

	CARA PENIMBANGAN BALITA		
	SOP	No. Dokumen : 445.1/ /SOP/X/2016	
		No. Revisi :	
		Tanggal Terbit : 28/10/2016	
Halaman : 1/2			
UPT. Puskesmas Paruga			<u>dr. H.M Natsir</u> NIP. 197607112005011008
1. Pengertian	Cara penimbangan balita adalah balita ditimbang dengan menggunakan pakaian seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil berat badan secara rill.		
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melakukan penimbangan balita		
3. Kebijakan	SK Kepala Puskesmas Paruga No : 445.1/ 001 / SK/X/2016 Tentang : Jenis-jenis Pelayanan Kesehatan Yang Tersedia Di UPT. Puskesmas Paruga		
4. Referensi	Buku Pegangan Kader, Kemenkes 2012		
5. Prosedur	Alat dan Bahan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dacin 2. Sarung timbang 3. Kaki Tiga 4. Tali penyangga 5. Kantung plastik berisi batu atau pasir untuk menyeimbangkan posisi dacin. 		
6. Langkah-langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gantung dacin pada tempat yang kokoh seperti penyangga kaki tiga atau pelana rumah, kusen pintu atau dahan pohon yang kuat. 2. Atur posisi batang dacin sejajar dengan mata penimbang. 3. Pastikan bandul dacin berada pada posisi angka nol dan posisi jarum tegak lurus. 4. Pasang sarung timbang/celana timbangan yg kosong pada dacin. 5. Seimbang dacing dengan member kantung plastik batu atau pasir diujung dacin sampai ujung jarum tegak lurus. 6. Masukkan balita kedalam sarung timbangan dengan pakaian seminimal mungkin dan geser bandul sampai ujung jarum tegak lurus. 7. Baca berat badan balita dengan melihat angka diujung bandul geser. 8. Catat hasil timbangan dengan benar dikertas atau buku bantu dalam kg atau ons. 9. Kembalikan bandul keangka nol dan keluarkan balita dari sarung timbangan , celana timbangan atau kotak timbangan. 		
7. Diagram Alir			
8. Hal-hal yang perlu diperhatikan			

9. Unit Terkait	1. Tenaga pelaksana gizi 2. Kader posyandu			
10. Dokumen terkait				
11. Rekaman historis perubahan				
	No	Yang Diubah	Isi Perubahan	Tanggal Mulai Diberlakukan